



PHALLOSAN

PHALLOSAN® Service 15.10.2009

- Original versiegelte Kondome anderer Größe werden kostenfrei gegen Ihre gewünschte Größe ausgetauscht.
- Sollte das Saugglockenkondom am Penis zu groß sein, kein Problem!
- Wir fertigen auch Zwischengrößen an. Zum Beispiel eine große Glocke L (large) mit einem M (mittleren) Dicht-Kondom, oder eine M Glocke mit einem S (small) Dicht-Kondom.

Rücksendung der umzutauschenden Kondome bitte an:

HGB AG, Am Wallgraben 18, DE-82541 Münsing, Deutschland



Neue wichtige Empfehlungen zur Gebrauchsanwendung:

Wir möchten Sie nun auf eine technische Besonderheit in der Anwendung der Stretchkondome hinweisen. Bitte bedenken Sie, dass es sich vereinfacht dargestellt um eine Saugglocke mit Dichtung handelt. Deshalb ist es nicht wichtig wie weit das Kondom über den Penis reicht. Das Kondom ist nicht konstruiert die Kraft auf den Penis zu übertragen. Die Kraftübertragung erfolgt einzig über das sich in der Glocke bildende Vakuum. Das Kondom ist nur eine Dichtung zwischen Saugglocke und Penis. Verbinden Sie den Saugball mit dem Stretchkondom. Nehmen Sie das vorbereitete Stretchkondom nun in Ihre Hand. Achten Sie bitte darauf, dass die Eichel beim Einführen in die Glocke nur etwa zur Hälfte eindringt. Erst jetzt rollen Sie das Dichtungskondom über dem Penis ab. Saugen Sie nun die Eichel mit Hilfe des Saugballs ganz in die Glocke hinein. Das Dichtkondom wird nun etwas in die Glocke mit eingesaugt. **Liegt das Kondom dicht und stramm am Penis an, ist es nicht notwendig zusätzlich das Klettband anzulegen.**

Sollte das Kondom am Penis etwas zu locker sein und Falten bilden, bringen Sie nun die Manschette am Penis an, ohne dabei den Penis zu strangulieren. Achten Sie bitte darauf, dass die weiche flauschige Seite des Klettbandes am Penis anliegt. Die andere Seite hat scharfe Zacken und könnte das Kondom beschädigen. Die Manschette dient nur dazu eventuell entstehende Falten, die durch das Strecken entstehen, glatt zu legen. Sie darf nicht beengen oder strangulieren.

Änderung der Pflegeanleitung für die Kondome:

Bitte verwenden Sie keinen Babypuder mehr, da dieser in der Zwischenzeit mit fetthaltigem Anilin versetzt ist. Wir empfehlen Talkum. Die Dichtungskondome sind empfindlich gegen Fette jeglicher Art.