



PHALLOSAN

**PHALLOSAN® Service** 09. Januar 2012

### **Neue wichtige Empfehlungen zur Gebrauchsanwendung:**

Wir möchten Sie nun auf eine technische Besonderheit in der Anwendung der Vakuumglocken mit den Spezialkondomen hinweisen. Bitte bedenken Sie, dass es sich vereinfacht dargestellt um eine Saugglocke mit Dichtung handelt. Deshalb ist es nicht wichtig wie weit das Spezialkondom über den Penischaft reicht. Das Spezialkondom ist nicht konstruiert die Kraft auf den Penis zu übertragen. Die Kraftübertragung erfolgt einzig über das sich in der Glocke bildende Vakuum.

Das Spezialkondom ist also nur eine Dichtung zwischen Vakuumglocke und Penischaft. Bringen Sie das passende Spezialkondom an der Vakuumglocke an. Stellen Sie dabei sicher, dass die dafür vorgesehene Wulst der Glocke sauber mit der Nut des Kondoms verbunden ist. Verbinden Sie den Saugball mit der Vakuumglocke,.

Achten Sie bitte darauf, dass die Eichel beim Einführen in die Glocke nur etwa zur Hälfte eindringt. Erst jetzt rollen Sie das Spezialkondom über dem Penischaft ab. Saugen Sie nun die Eichel mit Hilfe des Saugballs ganz in die Glocke hinein.

### **Änderung der Pflegeanleitung für die Spezialkondome:**

Beachten Sie, dass die Spezialkondome nach wenigen Tagen ihre Beschichtung verlieren. Sie sollten deshalb in einer Apotheke Babypuder erwerben und diesen auf der äußeren Fläche der Kondome anbringen. Es bildet sich eine Schutzschicht, die die Spezialkondome vor Abrieb und Verkleben besser schützt. So halten die Spezialkondome noch länger.

Die neuen Spezialkondome sind aus medizinischem Silikon hergestellt, sind praktisch allergenfrei und vertragen nun auch auf Öl basierende Pflegeprodukte.

