



PHALLO♂SAN®

DE	Gebrauchsanweisung
GB/US	Instructions for use
FR	Mode d'emploi
ES	Instrucciones de uso
IT	Istruzioni per l'uso
PT	Manual de instruções
BR	Manual de instruções
NL	Handboek voor gebruik
FI	Käyttöohje
PL	Instrukcja
HR	Uputstvo za upotrebu
CZ	Návod k použití
HU	Használati útmutató
BG	Инструкции за употреба
RO	Instrucțiuni de utilizare
RU	Инструкция по применению продукта
LT	Naudojimo instrukcija
TR	Kullanım kılavuzu
GR	Οδηγίες Χρήσης
CN	使用指南
JP	取扱説明書
AE	عليمات



Contenu de la boîte

1. Anneau en silicone avec revêtement en mousse, à mettre autour du pénis
2. Boucle de ceinture avec laquelle vous pouvez régler la ceinture (3)
3. Ceinture élastique à porter autour de la taille
4. Clip, sans nickel, avec lequel le préservatif de protection vacuum est fixé
5. Préservatif stretch, 3 tailles, à mettre sur le pénis. Le clip (4) permet de fermer hermétiquement le tuyau
6. Capuchon de protection du gland en cas de réglage trop fort de la traction, pour un résultat encore plus rapide
7. Poire à air pour générer un vide d'air (vacuum)
8. Gabarit de mesure
9. Bandes velcro (3 unités)
10. Cordon de sécurité avec petits crochets
11. DVD de description du produit et film télé
12. Mode d'emploi

Pour le traitement conservateur d'augmentation de la taille du pénis et de déviation du pénis, ainsi que pour le traitement de dysfonctions érectiles légères. Résultats prouvés par des études cliniques.

**Cher client,
Félicitations pour l'acquisition de votre PHALLOSAN® IPHALLOSAN® a déjà fait ses preuves dans diverses indications.**

Augmentation de la taille du pénis

En cas de forte sollicitation, notre organisme dispose d'un mécanisme lui permettant de former de nouvelles cellules afin de prévenir toutes lésions ou tensions. Ce mécanisme était déjà connu des peuples primitifs et utilisé à des fins culturelles pour l'allongement des oreilles, des lèvres et bien entendu du pénis. Les Sâdhus d'Inde et les Karamojong d'Ouganda du Nord attachent des poids à leur pénis pendant plusieurs années et obtiennent un allongement de près de 45 cm (cf. Encyclopedia Britannica, Stern n°49/95). Pendant presque un siècle, cette science reposait dans les archives anthropologiques et ethnologiques allemandes. Le succès de PHALLOSAN® repose sur le principe d'un étirement doux grâce à la génération d'un micro-vide (micro-vacuum). En portant la ceinture, une traction régulière et mécanique est exercée sur le pénis. Grâce à cet étirement permanent et indolore, le pénis est littéralement sorti

du corps, ce qui provoque des micro-déchirures indolores des fibres, comme cela est notamment le cas après une séance de musculation, micro-déchirures dans lesquelles l'organisme forme de nouvelles cellules. De cette manière, le pénis devient plus long et le gland plus gros, mais pas plus mince.

Étude clinique

En janvier 2005, une étude clinique portant sur PHALLOSAN® a été menée sous l'égide du Prof. Dr. méd. Sohn, chef de service de la clinique d'urologie de l'hôpital Markus de l'université de Goethe, située à Francfort sur le Main. Les données des patients ainsi que les résultats de cette étude menée sur six mois ont été analysés par le chef de clinique. Cette étude a été un grand succès. Pendant cette période, tous les patients ont constaté une augmentation de la taille et de l'épaisseur de leur pénis. Les résultats étaient en rapport direct avec la durée quotidienne du port de la ceinture. L'évaluation de ces résultats a été publiée à l'occasion du Congrès international d'urologie à Athènes. Jusqu'à présent, PHALLOSAN® est le seul appareil d'étirement du pénis ayant été testé de manière neutre et évalué positivement dans une clinique allemande.

Rétraction du pénis

Il y a rétraction du pénis lorsqu'en cas de prise de poids le pénis se retire dans les tissus graisseux sous-cutanés. La meilleure « thérapie »

consiste bien entendu à perdre du poids. Si cela ne se produit pas de manière satisfaisante, il est possible, avec PHALLOSAN®, de ressortir le pénis des tissus adipeux grâce à un étirement continu. PHALLOSAN® peut également être utilisé par des personnes paraplégiques, chez lesquelles ce phénomène est accentué par la paralysie des muscles abdominaux et la position assise. Cependant, seules les personnes paraplégiques continentales peuvent actuellement utiliser PHALLOSAN®, puisqu'il n'existe pas encore de préservatif avec dérivation du flux urinaire.

Petit pénis (hypoplasie pénienne)

Les hommes nés avec un petit pénis souffrent d'hypoplasie pénienne lorsque leur pénis reste petit (inférieur à 11–12 cm en érection). Un étirement continu avec PHALLOSAN® peut entraîner un allongement du pénis. Grâce au processus spécial de dépression, le volume du pénis augmente également.

Pénis perçu comme étant petit (dysmorphophobie pénienne)

Il ne faut en aucun cas négliger ni sourire des hommes qui ont simplement le sentiment d'avoir un pénis trop court ou trop petit. Toutes les catégories sociales sont ici représentées, indépendamment de leur niveau d'étude. Bien que la longueur de leur pénis érigé se situe dans la moyenne, ces hommes souffrent psychologiquement de la petite taille préten due de leur pénis. Ils craignent le regard de

leurs collègues et amis, dans les douches ou au sauna. Les hommes mesurent leur valeur à la taille de leur pénis. Beaucoup le ressentent ainsi. Les hommes qui ont un grand pénis non érigé symbolisent le pouvoir, la puissance sexuelle et la force. La dysmorphophobie pénienne commence souvent dans l'enfance, à l'école, et se manifeste plus tard, souvent lors d'expériences vécues pendant le service militaire, au sport, au sauna, etc.

Troubles de l'érection (dysfonctions érectiles légères)

Parmi les effets positifs de l'utilisation de PHALLOSAN®, on cite une meilleure qualité de l'érection, une sensibilité accrue du gland et avec elles une sensation de plaisir accrue lors des rapports sexuels. L'étirement avec dépression exercé par PHALLOSAN® favorise l'irrigation du pénis. De nombreux utilisateurs utilisent PHALLOSAN® en tant que thérapie anti-âge, le procédé ayant déjà été qualifié de « *musclature pour le pénis* ».

Soutien après un traitement hormonal du cancer de la prostate

Après traitement du cancer de la prostate, l'arrêt de la prise d'hormones entraîne un raccourcissement (rétraction) du pénis. Ce raccourcissement ne peut pas être compensé à long terme par la prise de Viagra (Sildenafil) ou par des injections intracaverneuses. Même après une prostatectomie totale, les

troubles de l'érection pouvant en résulter entraînent une réduction croissante du pénis. Certains urologues prescrivent alors du Viagra de manière préventive ou pratiquent des injections intracaverneuses.

PHALLOSAN® aide les patients atteints d'un cancer de la prostate à remédier efficacement et à un coût raisonnable au raccourcissement postopératoire du pénis.

Pénis courbé (déviation du pénis)

Une déviation du pénis est une déformation ou une courbure du pénis. Selon le degré de déviation, elle peut d'une part représenter une gêne esthétique et d'autre part être la cause de rapports sexuels douloureux voire d'absence totale de tels rapports. La déviation peut être congénitale mais également acquise, suite à une lésion du pénis ou de l'urètre. Jusqu'à présent, ces déviations ont été exclusivement corrigées par voie chirurgicale, avec pour conséquence un raccourcissement du pénis de 3 à 5 cm, inhérent à la technique opératoire. L'opération consiste à ajuster le corps caverneux le plus long au corps caverneux le plus court en « resserrant » ou en excisant les tissus excédentaires et à ainsi redresser le pénis. Après l'opération, le pénis n'est pas d'aspect agréable.

Maladie de Lapeyronie avec déviation parfois douloureuse (induration plastique des corps caverneux)

Cette maladie se caractérise par une sclérose

se plus ou moins étendue des corps caverneux, due à une infiltration scléreuse du tissu conjonctif. La cause n'en a pas encore été trouvée. Certaines catégories de personnes y sont plus sujettes que d'autres, comme les personnes diabétiques. La sclérose (plaques) est responsable d'une déviation douloureuse du pénis qui rend les rapports sexuels douloureux voire impossibles. Des essais de traitement conservateur à l'aide de médicaments, radiothérapie, thérapie par ondes de choc ou iontophorèse n'ont eu, dans certains cas, qu'un effet léniifiant et souvent passager. L'unique solution reste la correction par voie chirurgicale qui consiste à exciser ces plaques et à couvrir la perte de substance avec de la peau artificielle ou naturelle. Dans les cas les plus avancés, ceci sera bientôt le seul moyen thérapeutique envisageable. Chez de nombreux patients, cette correction entraîne cependant, selon la taille des plaques qui ont été enlevées, une restriction ou une perte totale de l'érection rendant nécessaire l'implantation d'une prothèse pénienne. PHALLOSAN® ne peut bien entendu pas remédier à cette sclérose, une opération ne le permettant déjà pas elle-même, mais peut redresser le pénis en activant la formation de tissus au moyen d'une traction constante. Avec PHALLOSAN®, le pénis est redressé, indépendamment du sens de la déviation. La plus grande tension est exercée sur la partie courbée, ce qui favorise l'apparition de micro-déchirures indolores des

fibres dans lesquelles l'organisme crée de nouvelles cellules. Un patient de 61 ans participant à l'étude du Prof. Dr. méd. Jehle avait une déviation du pénis de 90 degrés. Après 9 mois de traitement, la déviation avait presque disparu. Après 12 mois, le patient a déclaré avoir eu à nouveau des rapports sexuels. Aujourd'hui, 6 ans après la fin de la thérapie avec PHALLOSAN®, les effets sont toujours là. On peut en tout état de cause recommander une thérapie avec PHALLOSAN®, en tant qu'alternative provisoire à la chirurgie, d'autant plus qu'elle n'entraîne en rien le recours ultérieur à d'autres options thérapeutiques. Une étude a déjà apporté la preuve clinique d'une augmentation de la taille du pénis grâce au traitement réussi d'une déviation pénienne. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous faire parvenir ce rapport médical. Vous pouvez également le consulter sur internet www.phallosan.fr « Utilisation » – « Maladie de Lapeyronie » – « Preuve clinique : traitement réussi d'une déviation du pénis ».



Préparation :

Préparation : Veuillez disposer PHALLOSAN® devant vous et le régler avec la boucle de la ceinture (2) au maximum de sa longueur. Placez la ceinture autour de votre taille et réglez-la de telle façon que vous puissiez


rejoindre, avec une légère tension mais sans forcer, l'anneau en silicone (1) et le clip (4) devant votre ventre. Veuillez ensuite enlever la ceinture. N'ouvrez pas encore l'emballage du préservatif stretch ! Veuillez exactement vous conformer à ces instructions : seuls les préservatifs stretch qui sont encore dans leur emballage d'origine peuvent être gratuitement échangés. Les frais de port sont à la charge de l'expéditeur. Les emballages ouverts ne pouvant être remis en vente, un échange est totalement exclu. Il est recommandé d'enlever régulièrement les poils pubiens situés autour du pénis afin d'éviter que ceux-ci ne se prennent dans le préservatif stretch, ce qui pourrait provoquer des irritations lors du retrait du préservatif. Vous pouvez utiliser les crèmes dépilatoires traditionnelles.






1. À l'aide du gabarit, déterminez la taille de préservatif qui vous convient. Mesurez le corps du pénis et le gland du pénis non érigé.

2. Avant la première utilisation, il est recommandé de laver le capuchon protecteur afin


de retirer tout reste de la poudre appliquée lors de la fabrication pour éviter que les capuchons ne collent les uns aux autres.

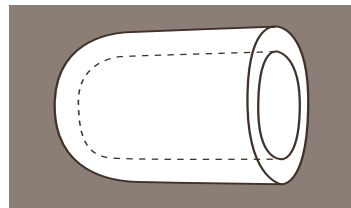

3. Mettez tout d'abord le capuchon protecteur sur votre pénis comme sur l'illustration. Vous pouvez laisser le prépuce sur le gland ou le retirer.

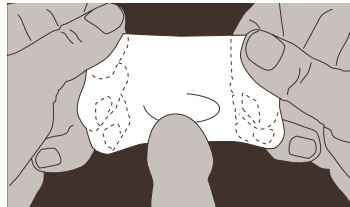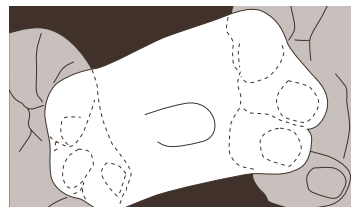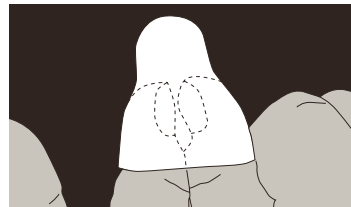


4. Veillez à ce qu'aucune bulle d'air ne se forme au bout du gland. Le capuchon protecteur sert à protéger votre pénis des effets d'un réglage trop fort de la traction. Le capuchon est doux et souple. Sortez de l'emballage le préservatif stretch correspondant à votre taille. Vous pouvez renvoyer les deux autres préservatifs dans leur emballage d'origine et les échanger contre des préservatifs stretch correspondant à votre taille. Nous fabriquons également des tailles intermédiaires, par exemple une ventouse « L » avec un préservatif « M ». **N'utilisez aucune pommade ou crème. Celles-ci nuisent au pouvoir d'adhérence et à la longévité du préservatif stretch.**

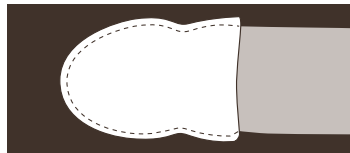

5. Nous voulons ici attirer votre attention sur une particularité technique relative à l'utilisation du préservatif stretch. Veuillez noter qu'il s'agit,

pour simplifier, d'une ventouse avec un joint. La longueur du préservatif n'a donc pas d'importance. Le préservatif n'est pas constitué de manière à exercer une force sur le pénis. La transmission de la force a lieu exclusivement au moyen du vide (vacuum) créé dans la ventouse. Le préservatif n'est qu'un joint entre la ventouse et le corps du pénis. Veuillez relier la poire à air au préservatif stretch. Veillez à n'introduire que la moitié du gland dans la ventouse. Déroulez maintenant le préservatif servant de joint sur le pénis. À l'aide de la poire à air, aspirez complètement le gland dans la ventouse. Le préservatif servant de joint est également un peu aspiré dans la ventouse.


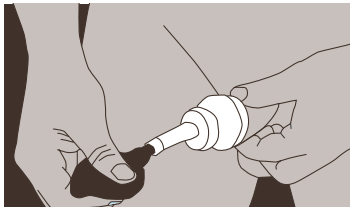


6. Le pénis est désormais aspiré dans la ventouse. Déroulez maintenant à nouveau le préservatif stretch sur le corps de votre pénis tout en continuant d'actionner la poire à air.




Si le préservatif est trop lâche et fait des plis, placez la bride, face duveteuse contre le préservatif, autour du corps du pénis, mais sans le compresser. Cette bride ne sert qu'à lisser d'éventuels plis apparus lors de l'étirement. Si le préservatif est déjà lisse, vous n'avez pas besoin de vous servir de la bride.


7. Laissez la poire à air, désormais un peu creuse, en place pendant que vous mettez la ceinture. Elle fixe le préservatif au pénis par aspiration.

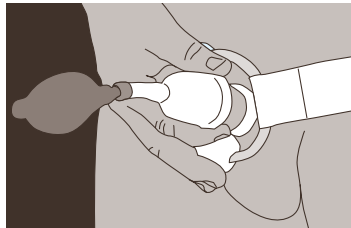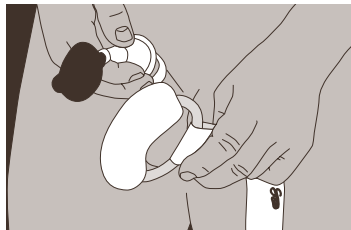


8. Ouvrez le clip en métal de l'autre côté de la ceinture. Réglez la ceinture au maximum de sa longueur. Pincez le bout du tuyau du préservatif, comme vous le feriez avec un ballon de baudruche, afin que l'air n'entre pas. Enlevez la poire à air et reliez le préservatif stretch au clip. Veillez à ce que le bout du tuyau du préservatif stretch soit fixé au milieu du clip.

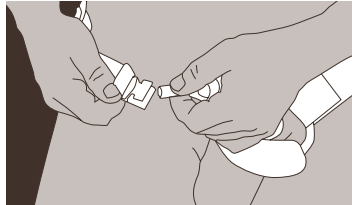

9. Ajustez la ceinture en veillant à ce qu'elle passe le long de l'aîne. Au niveau du fessier, tirez la ceinture vers le haut en direction de la taille. Si la ceinture est dans le pli fessier, la tension augmente en position assise et peut être désagréable.

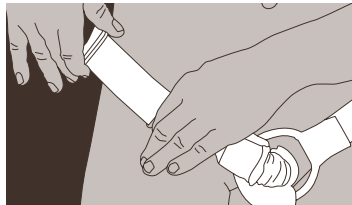

Les petits crochets permettent de relier les deux extrémités de la ceinture afin d'éviter qu'elle ne tombe si le clip devait glisser.



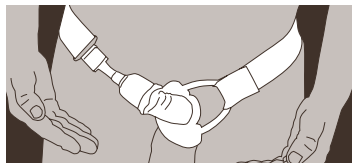


Entretien :

Le préservatif ne doit pas être retiré de la ventouse et, pour des raisons d'hygiène, doit être lavé tous les jours à l'eau tiède savonneuse. Avant le lavage, enlevez l'éponge verte et lavez-la à part. Après usage, n'oubliez pas de talquer le préservatif sec et déroulé. N'utilisez pas de talc pour bébés. Il contient en effet de l'aniline grasse. Laissez le préservatif déroulé jusqu'à la prochaine utilisation. Réenroulez-le seulement au moment de vous en resservir. Vous évitez ainsi que le préservatif ne se distende et ne colle.

Voici comment réenrouler le préservatif :

Poudrez la face externe du préservatif déroulé avec de la poudre non grasse (talc) et coincez la ventouse entre vos genoux. Vous avez alors les mains libres.

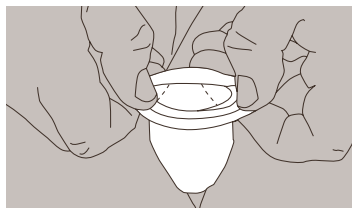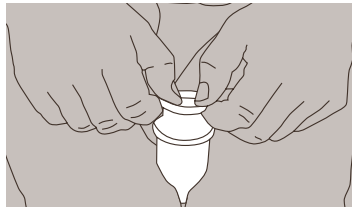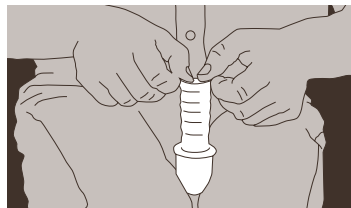

Enroulez le préservatif délicatement et passez-le autour de la ventouse. Soyez très prudent et n'endommagez pas le préservatif avec vos ongles ou autres objets tranchants.

Plan par étapes pour un ajustement exact du degré de traction de la ceinture sur le tissu conjonctif du pénis.

Avant-propos :

Le tissu conjonctif de l'organisme dépend de facteurs héréditaires, d'où de grandes différences d'une personne à l'autre. Un réglage général du degré de traction par gramme / kilogramme est irresponsable d'un point de vue médical. C'est pourquoi nous avons

développé un plan par étapes vous permettant d'ajuster exactement la tension de la ceinture à votre tissu conjonctif. Vous obtenez ainsi une augmentation optimale de la taille de votre pénis, en longueur et en épaisseur, sans aucun effet secondaire négatif.

1er jour :

Ne réglez pas la ceinture trop fort et portez-la 1 heure seulement. Ouvrez la ceinture et retirez le préservatif. Regardez la partie de votre pénis située entre le méat urétral et le frein du prépuce, sous le gland. C'est la partie du pénis où les tissus sont le plus sensibles ! Si cette partie est rouge ou enflée, la tension de la ceinture était trop élevée. Cessez l'utilisation pour ce jour-là. S'il n'y a aucun changement de couleur, faites une marque sur la boucle coulissante de la ceinture. Cessez également l'utilisation pour ce jour-là.

2è jour :

Pour les patients ayant le jour précédent constaté une rougeur ou une enflure : portez la ceinture pendant une heure en réduisant la tension. Après une heure, regardez la partie de votre pénis située entre le méat urétral et le frein du prépuce, sous le gland. Si cette partie est rouge ou enflée, la tension de la ceinture était à nouveau trop élevée. Cessez l'utilisation pour ce jour-là. Pour les patients n'ayant constaté aucune rougeur ou enflure le jour précédent : portez la ceinture pendant 2 heures et regardez ensuite la partie de

votre pénis décrite plus haut. Si vous ne constatez aucune rougeur ou enflure, portez la ceinture une heure de plus le jour suivant.

3è jour et jours suivants jusqu'au 8è jour :

Pour les patients avec et sans rougeur ou enflure du premier jour : si vous avez pu porter la ceinture le 2ème jour sans que n'apparaisse rougeur ou enflure sur la partie décrite plus haut, portez la ceinture pendant 3 heures. Si après 3 heures vous constatez une rougeur ou une enflure, réduisez la tension et remettez la ceinture pendant 3 heures le jour suivant. Si vous n'avez constaté aucune rougeur ou enflure, portez la ceinture chaque jour une heure de plus. Si, dans les jours qui suivent, vous constatez une rougeur ou une enflure de la partie située entre le méat urétral et le frein du prépuce, sous le gland, réduisez la tension de la ceinture, marquez cet endroit sur la ceinture avec un stylo et portez la ceinture le jour suivant en réduisant la tension. Veillez à ce que la rondelle en mousse verte appuie contre le gland. Veuillez respecter les étapes de ce plan. Vous serez enchanté de porter PHALLOSAN®. En l'espace de quelques mois, votre pénis sera plus long et plus épais. Vous ne ressentirez que des effets secondaires positifs, comme de plus fortes impulsions sexuelles et un désir sexuel plus intense, sans éjaculation précoce. Cause : avec PHALLOSAN®, le pénis est plus irrigué. Ceci influe sur l'ensemble des tissus et des terminaisons nerveuses. Bonne chance !

Durée d'utilisation

PHALLOSAN® devrait être porté chaque jour entre 8 et 10 heures par jour, mais aussi plus longtemps ! N'oubliez pas de faire une pause de 5 minutes toutes les 3 ou 4 heures, de retirer le préservatif stretch et de masser votre pénis pendant environ 1 minute. Après 8 jours, ceci n'est plus nécessaire. Plus l'utilisation quotidienne est longue, plus les résultats seront rapides ! De nombreux utilisateurs portent PHALLOSAN® jusqu'à 12 heures par jour, avec les résultats correspondants. Pour des raisons de santé (possibilité d'infection bactérienne), le préservatif doit être lavé tous les jours avec de l'eau tiède savonneuse. Vous pouvez également porter PHALLOSAN® la nuit, puisque le préservatif s'étire en cas d'érection nocturne.

Effets secondaires, mesures de précaution.

Vous utilisez PHALLOSAN® à vos risques et périls, l'utilisation étant toutefois sans risque si vous vous conformez au mode d'emploi. Pendant les premières semaines d'utilisation, il suffit de bien veiller à ne pas exercer une trop forte traction sur votre pénis. Habituez les tissus à PHALLOSAN® et, au début, réglez la ceinture (3) sur une traction légère. Au début, regardez toutes les heures si votre pénis change de couleur (signe de perturbation de l'irrigation sanguine) ou enflé. Si un changement de couleur devait toutefois se manifester,

spécialement à proximité du méat urétral, ouvrez immédiatement la ceinture (3) et regardez si votre pénis présente des signes de perturbation de l'irrigation sanguine ou des enflures. Si une enflure et/ou des vésicules apparaissent sur le prépuce ou le gland, la ceinture (3) est réglée trop fortement. Faites absolument une pause jusqu'à ce que l'enflure ou les vésicules disparaissent. Réduisez ensuite le degré de traction. Il faut que vous soyez patient : quant aux résultats, le processus d'agrandissement du pénis est comparable à celui d'un redressement dentaire. La continuité de l'étirement est un gage de réussite, et pas seulement le degré de traction !

Vous ne devez pas porter PHALLOSAN® dans les cas suivants :

Après avoir consommé de l'alcool, après avoir pris drogues ou antalgiques, somnifères ou tranquillisants, la perception de la douleur pouvant alors être perturbée. Évitez d'utiliser PHALLOSAN® en cas d'infections ou plaies ouvertes au pénis, ainsi qu'en cas de faiblesse veineuse ou des tissus conjonctifs.

Comment puis-je exactement mesurer l'augmentation de la longueur de mon pénis ?

Veillez utiliser un mètre pliant. Tenez votre pénis non érigé à 90 degrés devant vous. Posez le mètre sur le côté du pénis. Appuyez le mètre contre le pubis. Vous obtenez ainsi la longueur de votre pénis. Procédez de la

même façon si vous souhaitez mesurer la croissance de votre pénis érigé.

Important : avant d'utiliser PHALLOSAN®, pesez-vous sans vêtements. En cas de prise de poids, une couche de graisse se forme en particulier dans la zone de pilosité pubienne autour du pénis. Cette couche de graisse raccourcit la distance entre le bout du pénis et le pubis, faussant ainsi le résultat. C'est ce que les médecins appellent le tablier graisseux.

Toutes les pièces de PHALLOSAN® peuvent être commandées séparément. Si vous avez des questions ou des suggestions, nos experts se tiennent à tout moment à votre disposition au prix d'un appel local.

Sous réserve de modifications techniques que nous publions sur internet

www.phallosan.fr

Interlocuteurs en Allemagne:

HGB AG
Am Wallgraben 18
DE-82541 Münsing
Allemagne

Tél. +49 81 77 93 16 10
Fax: +49 81 77 93 16 20

mailto: info@hgbag.com
Phalomed, 11.2009

Profitez de l'offre de parrainage de PHALLOSAN®

Votre parrainage sera récompensé. Si vous êtes déjà client et que, grâce à votre recommandation, un nouveau client commande PHALLOSAN® par internet, courrier ou téléphone et reçoit ainsi un numéro de client, nous vous remercierons en vous offrant un chèque cadeau de 43,00 euros frais de port inclus pour l'achat d'un préservatif stretch de la taille de votre choix.

J'étais déjà client de PHALLOSAN® et j'ai convaincu un nouveau client des performances de PHALLOSAN®.

Facture n° _____

Nom _____

Rue _____

Code postal, ville _____

Le client que j'ai parrainé est :

*Conditions de participation : la commande du nouveau client doit impérativement être passée auprès d'HGB AG ou Phalomed Ltd. après la commande du parrain. Cette offre spéciale commence le 1er novembre 2009 et finit le 31.12.2010 (fin de l'offre). Les commerçants sont exclus de la participation. Le chèque cadeau sera expédié après expiration du délai légal de rétractation ouvert au nouveau client. La valeur correspondant au chèque cadeau ne pourra être versée en espèces.

Nom _____

Facture n° _____

La taille de mon préservatif stretch d'une valeur de 38 Euro est (veuillez cocher) :

S = ventouse S avec préservatif S

MS = ventouse M avec préservatif S

M = ventouse M avec préservatif M

LM = ventouse L avec préservatif M

L = ventouse L avec préservatif L

XL = ventouse XL avec préservatif XL

Veuillez remplir ce formulaire et le retourner à :

**HGB
Marketing – Product Management
Am Wallgraben 18
DE-82541 Münsing
Allemagne**

Date limite des envois : 31.12.2010

GUARANTEES

Phallosan has several guarantees certifying you have purchased
a medical device meeting the essential standards of quality and performance.
(see guarantee icons below)

We sincerely hope you are satisfied with our product.

OUR GUARANTEES



Phalomed Manufacturing Ltd., UB3A Industrial Estate
San Gwann SGN 3000, Malta

Customer service: HGB AG, Am Wallgraben 18, 82541 Münsing, Germany
Phone: +49 - (0) 81 77 - 93 16 10 • Fax: +49 - (0) 81 77 - 93 16 20