

## تعليمات

أثبت الاختبار السريري فعاليته في العلاج المحافظ لتكبير القضيب وتقوس القضيب وكذلك في علاج ضعف الانتصاب الخفيف.

عزيزي الزبون

تهانينا على شراء Phallosan®

Phallosan® أثبت نجاحه على مختلف الواجهات.

### تكبير القضيب

يحتوي جسم الإنسان على آلية – تجعل تحت تأثير الضغط – خلايا الأنسجة تتضاعف ويزداد النسيج تدريجيا وذلك لتجنب وقوع إصابات أو إجهاد. كانت الشعوب البدائية أول من تعرف على هاته الآلية واستعملتها لأغراض دينية، لزيادة حجم حلمة الأذن والشفيتين وبطبيعة الحال لتكبير القضيب. وقد تمكن مثلا ما يسمى أقوام سادهاوس المقدس في الهند وكرامويونغ في شمال أوغندا من تمديد العضو لدرجة قد تصل 45 سم عن طريق تعليق الأوزان عليه(انظر موسوعة بريطانيا، نجمة رقم 49/95).

بقيت هاته المعرفة قرابة قرن من الزمن محفوظة في الأرشيفات الأثرية وبيولوجية والإنتولوجية في ألمانيا. نجاح Phallosan® يستند إلى مبدأ التمديد اللطيف على مدى الفراغ الجزئي.

عندما يرتدى الحزام، يمارس تدريب ميكانيكي متساوي على القضيب. من خلال هذا التمديد الدائم والغير مؤلم يجر القضيب بطريقة سليمة من الجسم، هنا يحدث كما يحدث عندما يمارس المرء كمال الأجسام حيث يزداد عدد الخلايا عندما تخضع لقوة شد متواصلة. بهذه الطريقة يصبح القضيب ولاسيما الحشفة تصبح غليظة وليست رقيقة.

## دراسة سريرية

في يناير 2005 اكتملت دراسة على

Phallosan® تحت إشراف الدكتور زون

رئيس عيادة المسالك البولية في مستشفى

ماركوس التابع لجامعة غوته في فرانكفورت.

تم تحديد بيانات المشاركين ونتائج الدراسة التي

استمرت نصف سنة من قبل الطبيب وقد أظهرت

الدراسة نجاحا كبيرا. فقد كبر القضيب وازداد

سمكه لدى جميع المشاركين في هاته الدراسة.

النتائج لها علاقة مباشرة بالارتداء اليومي

ل Phallosan®؛ وقد تم نشر النتائج بمناسبة

انعقاد المؤتمر الدولي لأخصائي المسالك البولية

بمدينة أثينا. وبذلك يكون Phallosan®

هو جهاز تمديد القضيب الوحيد حتى الآن، الذي

اختبر بشكل محايد في أحدى المستشفيات

الألمانية وجاءت النتائج إيجابية.

### رتراكتيو القضيب

رتراكتيو القضيب مصطلح يشير إلى الحالة التي

تجعل القضيب يتراجع في الأنسجة تحت الجلد بسبب

السمنة. أفضل طريقة للعلاج هي نقص الوزن،

ولكن إن كنت غير راض على النتائج هناك إمكانية

جر القضيب من الأنسجة الدهنية عن طريق التمديد

المستمر للقضيب بواسطة Phallosan®.

بالنسبة للأشخاص المصابين بثقل نصفي، اللذين

تتفاقم عندهم هاته الحالة بسبب الثقل الذي أصاب

عضلات البطن وبسبب وضعية الجلوس في كرسي

متحرك فبإمكانهم أيضا استعمال Phallosan®

ولكنه صالح فقط للذين يعانون من ثقل نصفي

ويتحكمون في جسمهم، لأنه لا يوجد لحد الآن وأقي

ذكرى بإمكانه في نفس الوقت اشتقاق رفلوكسوغين.



### محتويات العبة:

1. حلقة من السيليكون مغطاة بطبقة مطاطية يتم ادخال القضيب فيها
2. مشبك لتعديل الحزام (3)، للاستعمال الفردي
3. حزام مرن يلبس حول الخصر
4. مقبض خال من النيكل لتثبيت الجرس الواقي بشكل آمن
5. الجرس الواقي، متوفر في 3 أحجام، يتم وضعه على القضيب
6. غطاء واق لراس القضيب، يؤمن له الحماية من قوة الضغط، ويمنع تورم واحمرار البشرة.
7. مضخة كروية
8. قالب قياس
9. شرائط الفيلكرو (3 قطع)
10. حبل أمان مع سنابير
11. DVD و فيلم تلفزيوني يتضمنان شرح مفصل للمنتج
12. كتيب معلومات

## قضيب صغير ( هيبوليزيا القضيب )

بالنسبة للرجال الذين يولدون بقضيب صغير وهذا ما يسمى بهيبوليزيا القضيب ، أي عندما يبقى القضيب صغيرا رغم كبر المرأة ( تحت 11 – 12 سم عندما يكون القضيب منتصباً ) يمكنهم تكبير القضيب بواسطة Phallosan® وذلك عن طريق التمديد المستمر للقضيب بواسطة عملية التفريغ الخاصة.

## الإحساس بصغر القضيب ( الإحساس الذاتي بصغر القضيب )

لا يجوز لنا تحت أي ظرف من الظروف إهمال أو التغيرية من الرجال الذين يصبون بأن قضيبهم صغيراً أو قصير. هؤلاء الرجال ينتمون بغض عن مستواهم التعليمي، لفئات اجتماعية متعددة. فرغم أن طول قضيبهم قد يصل إلى متوسط الطول في حالة الانتصاب، إلا أنهم يعانون نفسياً من صغر حجم قضيبهم المفترض. إنهم يخافون من نظرة المرأة مثلاً لقضيبهم. فالرجال يقدرون قيمة القضيب ولديهم هذا الإحساس. والرجال الذين يتوفرون على قضيب كبير حتى عندما يكون غير منتصب، ينظر إليهم كرجال أقوياء لديهم قدرة جنسية وجسمانية. الإحساس بصغر القضيب يبدأ غالباً في المدرسة ويظهر في الكبر عند التجنيد ، عند ممارسة الرياضة وفي الحمام التركي الخ.

## خلل الانتصاب) عدم القدرة على الانتصاب على نطاق خفيف)

أظهرت حالات انفرادية أن استعمال Phallosan® يحسن من جودة الانتصاب، ويزيد الحساسية على صعيد الحشفة، مما يؤدي لزيادة المتعة الجنسية. فبواسطة Phallosan® يزداد القضيب بالدم بشكل أكبر. والكثير من المستعملين يستعملون Phallosan® في سن الشيخوخة للتغلب على آثارها. وقد وصفت هاته الطريقة بكمال الإجماع للقضيب.

## دعم بعد علاج هرموني لسرطان البروستاتا.

بعد العلاج من سرطان البروستاتا بسبب سحب الهرمونات تصغير القضيب. هذا التراجم لا يمكن تعويضه عن طريق تناول حبوب الفياغرا مثلاً. والإزالة الجذرية للبروستاتا تؤدي غالباً إلى قصر القضيب بشكل مستمر. هناك أطباء يسلمون مرضاهم حبوب الفياغرا أو يعالجونهم بالحقن للتغلب على هذا المشكل. Phallosan® يساعد مرضى سرطان البروستاتا لمواجهة مشكل قصر القضيب بعد العملية الجراحية بنجاح وبشأن مناسب.

## اعوجاج القضيب ( القضيب المنحرف )

المقصود من اعوجاج القضيب هو انحرافه. حسب درجة الانحراف قد يؤدي هذا الاعوجاج من ناحية إلى إزعاج من الناحية الجمالية ، ومن جهة أخرى إلى الألم عند الجماع أو تجعله مستحيلاً. هذا التشوه قد يكون موجود منذ الولادة، ولكنه قد يحدث أيضاً في وقت لاحق بعد إصابة في القضيب أو مجرى البول. وقد تمّ لحد الآن تصحيح هاته التشوهات جراحياً فقط. ولكن العملية الجراحية تؤدي لتقصير القضيب بنسبة قد تصل 3 إلى 5 سم. كما يتم أثناء العملية نقص أو تخييط الأنسجة الطويلة في الجسم لتتناسب مع الأنسجة القصيرة ، ولذلك يتم وضع القضيب بشكل متوازي مع الجسم مما يجعل مظهره لا يبدو جميلاً بعد العملية.

## مرض القساوة على صيد القضيب مع اعوجاج مؤلم أحياناً ( مرض بيروني )

قساوة اعوجاج عتبه جلد الجسم الناتجة عن الإفراط في تشكيل النسيج الضام تختلف عند المصابين بهذا المرض. وسبب هذا المرض لم يعرف حتى الآن. هناك جماعات محددة أكثر عرضة للإصابة به

منهم مثلاً العديد من مرضى السكري. هذه القساوة تؤدي إلى تشوهات مؤلمة على صعيد القضيب مما يؤدي إلى حدوث آلام عند الجماع أو تجعله مستحيلاً. محاولة العلاج المحافظ سواء بالأدوية أو بالأشعة السينية أو بالموجات الكهربائية كانت كلها مهدآت وغالباً لوقت قصير فقط.

وفي نهاية المطاف يبقى التصحيح الجراحي عن طريق تقطيع هاته القساوة وتغطية الخلل بواسطة الجلد الذاتي أو الصناعي كحل. هذه الطريقة تصبح في المستقبل طريقة العلاج الوحيدة في الحالات المتقدمة. ولكن هذا التصحيح يؤدي لدى الكثير من المرضى ، حسب حجم القساوة المقطوعة ، إلى انخفاض أو فقدان كامل لعملية الانتصاب. مما يؤدي في النهاية إلى لزوم غرس ما يسمى ببندلة القضيب. بطبيعة الحال حل أو إزالة هاته القساوة بواسطة Phallosan® غير ممكن. غير ممكن أيضاً عن طريق الجراحة ، ولكن بواسطته يمكن إعادة تقويم القضيب عن طريق جعل أنسجة الانتصاب تكون نسيجاً جديداً بشكل مستمر. فبواسطة Phallosan® يتم جر القضيب بشكل

يجعله مستقيماً بغض النظر عن اتجاه الاعوجاج. في مكان الاعوجاج تتكون أكبر درجة توتر ، لذلك تتكون في تلك المنطقة بشكل مترادب ألياف دقيقة غير مؤلمة فيها يفرس الجسم خلايا جديدة.

في دراسة حالة من طرف البروفسور الكتور بهله، كان لمرضى عمره 61 عاماً اعوجاج 90 درجة. بعد حوالي 9 أشهر اختفى الاعوجاج وقد حكي المريض أنه تمكن من ممارسة الجنس بعد 12 أسبوعاً. وقد دام العلاج إلى يومنا هذا بعد 6 سنوات من انتهاء العلاج. ومحاولة العلاج ب Phallosan® ينصح بها كبديل مؤقت للعملية الجراحية ، خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن خيارات العلاج الأخرى غير فعالة.

في دراسة حالة ثم الإثبات سريريا أن تكبير القضيب نجح في تقويم اعوجاجه. يمكنك بكل سرور الحصول على هذا التقرير الطبي إذا طلبته. كما يمكنك تحميل التقرير من [www.Phallosan.de](http://www.Phallosan.de) "وظيفة" – "قساوة على صعيد القضيب" – "الإثبات السريري لنجاح علاج اعوجاج القضيب"




## إعداد:

انشر Phallosan® من فضلك وأعدّه بواسطة إيزيم


الحزام (2) على أقصى طوله. ضع الحزام حول الخصر بطريقة تمكن حلقة السليكيون (1) والمقصر (4) يلتقيان أمام بطنك بطريقة فضفاضة وبوتور خفيف ، ضع الحزام بعد ذلك جانباً. لا تفتح الواقي الذكري القابل للتمدد الآن واتبع بالضبط هاته التعليمات. فنحن نبدل الواقي الذكري القابل للتمدد الذي يكون مغلقاً فقط ، ونرسل لك آخر يناسب حجمك وتكاليف البريد يتحملها المرسل، أما الواقي الذكري الذي فتح فلا يمكن لنا إعادة بيعه من المستحسن إزالة شعر العانة الموجود حول القضيب لتجنب الإزعاج الذي قد ينجم عن التفاف الشعر حول الواقي الذكري القابل للتمدد والتهيجان الذي قد يسببه هذا الالتفاف عند نزح الواقي. يمكنك استعمال كريمات مزيل الشعر الموجودة في الصيدليات.

6- أوصل المضخة الكروية بالواقى القابل للتمدد واسحب رأس القضيب باتجاه الكرة عبر ضخ الكرة المأصاة.

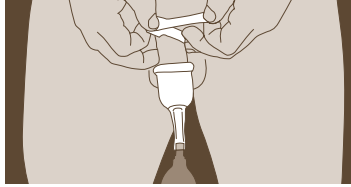


لقد أصبح الجزء الأعلى من القضيب داخل الجرس الواقى. خلال متابعة ضخ الكرة المأصاة، اسحب انتفاخ الواقى الذكري على إمتداد القضيب المتجه نحو شعر العانة.

7- إترك الكرة المأصاة حيث هي، مُرغاة من الهواء بعض الشيء ومعلقة على الواقى الذكري، بينما تستمر بوضع الحزام القابل للتمدد، وستبقى المضخة المأصاة الواقى ملتصقا بالقضيب




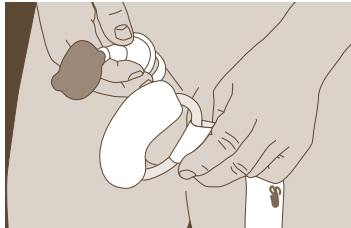


خذ الآن الواقى الذكري المناسب لحجمك من المغلف. الواقيين الآخرين يمكنك إرسالهما إلينا وسنرسل لك آخرين يناسبان حجمك مجاناً. نحن نصنع أحجاماً مختلفة مثلًا جرس كبير و واقى ذكري متوسط.

لا تستعمل المراهم والكريمات لأنها تؤثر على متانة ومدة صلاحية الواقى الذكري القابل للتمدد.

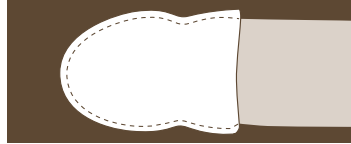


5- ضع الواقى القابل للتمدد المناسب لحجم قضيبك في يدك، ثم بلل الغطاء الواقى بواسطة الريق، الجل. ثم أدخل قضيبك في الهيكل الجامد من الواقى القابل للتمدد. بعد ذلك، الرجاء إتباع التعليمات كما هي مفصلة في مقدمة الكتيب.

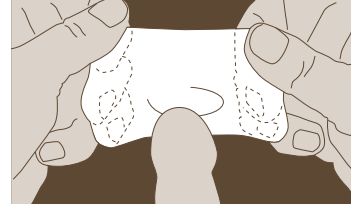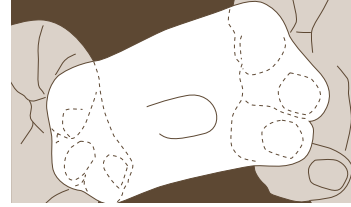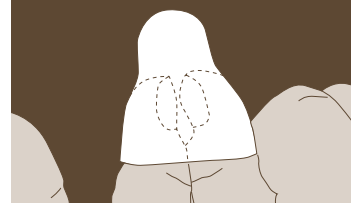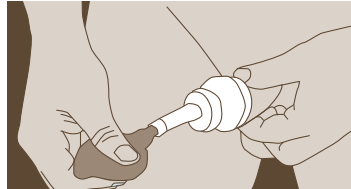

4. الرجاء الحرص على عدم بقاء أي فقاعات هوائية حول منطقة رأس القضيب عند وضع الغطاء الواقى. وقد أرفقنا أغطية واقية لتجنب أي آثار جانبية، كالإلتصاق القوي على الحزام



1. حدد بواسطة قالب قياس الحجم الواقى الذكري المناسب لك. يجب قياس القضيب و الحشفة عندما يكون القضيب غير منتصبا  
2. الرجاء غسل الواقى بالصابون، قبل الإستعمال الأول، لإزالة البودرة. تم وضع البودرة لتجنب التصاق الطرفين على بعضهما البعض. إذا بقيت البودرة على الطرفين يمكن التسبب بإنزلاق القضيب من الغطاء.

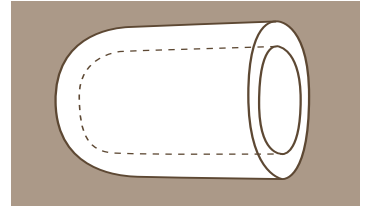

3. ضع الغطاء الواقى كما هو مبين في الصورة على أعلى القضيب. ولا يهم إذا سحب رأس القضيب إلى الوراء أولاً، فهذا يعود إليك.

## طريقة مرحلية دقيقة لضبط ضغط الحزام على النسيج الرابط للقضيب:

### مقدمة:



تعتمد خصائص النسيج الرابط على عوامل وراثية فريدة وتختلف حسب الأشخاص. وعليه، فإن اعتماد طريقة موحدة للضغط حسب الغرام/الكيلوغرام يعدّ غير مسؤولاً من الناحية الطبية. ولذلك، فقد طورنا خطة مرحلية للضبط، تمكنك من ضبط ضغط الحزام بدقة لملاءمة أنسجتك الرابطة. وبهذه الطريقة، ستتحقق النتائج المثلى من حيث تكبير قضيبك طويلاً وسماكة وبدون أي آثار جانبية.

### اليوم الأول:


اضبط الحزام بطريقة مريحة وارتيبه لساعة واحدة فقط. افتح الحزام بعد ذلك، وانزع الواقي. إفحص الآن منطقة القضيب الممتدة بين فتحة مجرى البول ورأس القضيب. هذه هي أكثر أجزاء القضيب حساسية.

إذا حدث إحمرار أو تورم في هذه المنطقة، فهذا يدل على أنه قد تم شدّ الحزام بقوة، فتوقف عن استعماله طوال اليوم.


طريقة مناسبة لإعادة لف الواقي الذكري: رش الطبقة الخارجية من الواقي غير الموضّب بمسحوق غير دهني (بودرة التلك) ثم تثبت طرف إنبوب الكرة المأمّسة

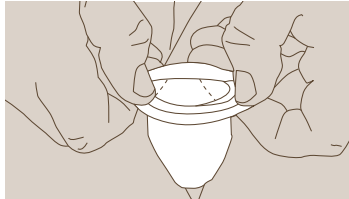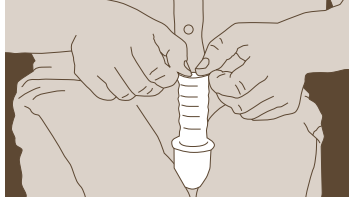

بين ركبتيك. أصبحت كلتا يديك فارغتين. دحرجه بروية وحذر إلى ما وراء الحافة الداخلية للجرس. الرجاء الانتباه لتجنب إلحاق الضرر بالواقي بواسطة الأظافر الحادة، وما إلى ذلك

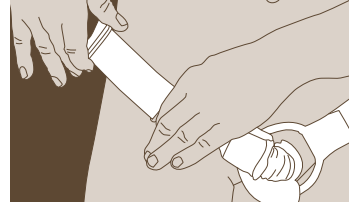


هذا كل شيء عن المنتج! رغم أنه يبدو معقداً قليلاً عند بداية الإستعمال، غير أنه يصبح سهلاً جداً بعد أيام قليلة من إستعماله.

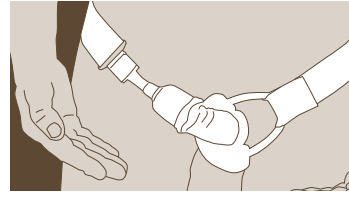


### العناية:

لا ينبغي أن يسحب الجرس الواقي الذكري ويجب غسله بالماء والصابون يومياً لأسباب صحية. أبعاد الإسفنج الأخضر عند الفسل ونظفه لوحده. لا تنسى من فضلك أبداً بعد استعمال الواقي الذكري وتجفيفه وطيه، رشه ببودرة التلك، والتي ستحصل عليها في أي متجر للأدوات الرياضية. لا تستخدم بودرة الأطفال، لأنها مختلطة بالانيلين الدهنية. بعد ذلك يمكنك إعادة نشر الواقي الذكري. وبذلك ستجنب تراجع أو التصاق الواقي الذكري.

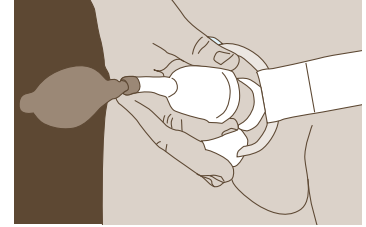

8- افتح المقبض المعدني من الجانب الآخر للحزام. وسع الحزام إلى أقصى طوله. اضغط الآن على طرف إنبوب الواقي، كما لو كنت تضغط على عنق البالون لمنع الهواء من الدخول. إنزع الكرة المأمّسة واصل الواقي القابل للتمدد بالمقبض. تأكد من تثبيت طرف إنبوب الواقي القابل للتمدد بوسط المقبض.

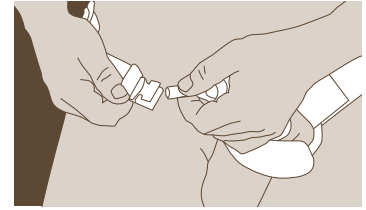

9- ضيّق الحزام القابل للتمدد، واحرص على تشغيل الحزام على امتداد الضلع. إسحب الجزء الخلفي من الحزام باتجاه الخصر. إذا اتخذ الحزام وضعية على طية المؤخرة، فإنه يؤدي إلى زيادة الضغط عند الجلوس، مما يسبب إحساساً بالإنزعاج.

## اليوم الثاني:

الذين عانوا من الإحمرار خلال اليوم السابق:

إذا اكتشف إحمرار أو تورّم في المنطقة المذكورة خلال اليوم السابق، خفف قوّة الشّد والبس الحزام لساعة. بعد ساعة، إفحص منطقة القضيب الممتدة بين مجرى البول ورأس القضيب. إذا استمر الإحمرار والتورّم في هذه المنطقة، فهذا يعني أن الحزام مشدود بقوة مرة أخرى. توقف عن استعماله طوال اليوم.

الذين لم يعانوا من الإحمرار أو التورّم خلال اليوم السابق:

مدد فترة الإرتداء لساعتين ثم افحص المنطقة المذكورة مرة أخرى. إذا لم يحدث أي احمرار أو تورّم، مدد فترة الإستعمال لساعة إضافية في اليوم التالي.

## من اليوم الثالث حتى اليوم الثامن:

الذين عانوا والذين لم يعانوا من الإحمرار أو التورّم خلال اليوم الأول وتواليه: إذا تمكنت من ارتداء الحزام خلال اليوم الثاني بدون أي احمرار أو تورّم في المنطقة المذكورة، فالبس الحزام لمدة ثلاث ساعات خلال اليوم الثالث. إذا اختبرت أي

احمرار أو تورّم بعد ثلاث ساعات، خفف من شدة الحزام، وأعد ارتدائه لنفس المدة في اليوم التالي. إذا لم يحدث أي احمرار أو تورّم، مدد فترة الإرتداء لمدة ساعة إضافية كل يوم.

إذا حدث أي احمرار أو تورّم خلال الأيام اللاحقة في المنطقة الممتدة بين فتحة مجرى البول ورأس القضيب، خفف من شدة الحزام. ضع علامة على الحزام بواسطة القلم وارتي الحزام بضغط أقل في اليوم التالي.

الرجاء التأكّد من أن القرص المطاطي الأخضر مضغوط على رأس القضيب. إن متابعة هذه الخطة المرحلية سوف تجعل تجربة ارتداء PHALLOSAN ممتعة. وستتمكن من زيادة طول وسماكة قضيبك في خلال بضعة أشهر فقط. سوف تختبر نتائج إيجابية فقط، كتنفوية الإثارة الجنسية، والإحساس بالمتعة، وبدون قذف مبكر. والسبب أن ارتداء PHALLOSAN يعزز الدورة الدموية في القضيب. ولهذا آثار إيجابية على كافة الأنسجة وأطراف الأوتار.

ونتمنى لكم النجاح!

## مدة الإستعمال:

يجب ارتداء PHALLOSAN لمدة لا تقل عن 8-10 ساعات في اليوم أو أكثر! ولا تنسى أن تأخذ فترة استراحة لمدة 5 دقائق كل 3-4 ساعات، تقوم خلالها بنزع الواقي القابل للتمدد وتلك قضيبك لحوالي دقيقة من الوقت. تعتبر هذه الإستراحات المتوسطة غير مؤذية وتعزز نتائج متساوية القياس. وكلما أطلت فترة الإستعمال، كلما اختبرت النجاح بشكل أسرع! يرتدي الكثير من العملاء

PHALLOSAN لمدة قد تصل إلى 12 ساعة يوميًا ويحصلون على النجاح المطلوب. ويجب غسل الواقي القابل للتمدد مرة كل يوم بالصابون والماء الفاتر، وذلك لأسباب صحية (خطر الإلتهاب البكتيري).

## الآثار الجانبية والإجراءات الوقائية:

يقع استعمال PHALLOSAN على مسؤوليتك الخاصة. ولكنه آمن بشكل تام إذا تم اتباع إرشادات الإستعمال بحذر شديد. كما يجب عدم الضغط بشدة على القضيب خصوصاً خلال الأسابيع الأولى من الإستعمال.

ويجب تعويد الأنسجة تدريجياً على

PHALLOSAN.

## في البداية، ثبت الحزام (3) على

الضغط بشكل خفيف وراقب تغيير لون قضيبك أو تورّمه كل ساعة (إشارة إلى ضعف الدورة الدموية). في حال حصول تغيير في اللون (خصوصاً حول منطقة مجرى البول)، يتم إستنباغه عادةً بالمّ و تورّم، عندها يجب فتح الحزام فوراً وفحص القضيب لمعرفة إمكانية وجود حالات ضعف في الدورة الدموية أو تورّم.

إذا تم إكتشاف تورّم أو قروح على القلفة أو رأس القضيب، فهذا يدل على أنه تم شد الحزام بشكل قوي. إنتظر حتى تهدأ القروح والتورّم، ثم خفف ضغط الحزام قليلاً. الرجاء التحلي بالصبر. لأن نجاح عملية تكبير القضيب مشابهة لعملية تسوية الفك، حيث يرتكز نجاح العلاج على إستمرارية عملية التمديد وليس فقط على عملية الشد.

## يجب عدم إرتداء PHALLOSAN

### في الحالات التالية:

استهلاك الكحول، تعاطي المخدرات أو المسكنات، الحبوب المنومة والمهدئات، لأن هذه المواد تؤثر على الإحساس الطبيعي بالألم.

## يجب عدم إستعمال PHALLOSAN

في حالات وجود التهابات أو جروح ظاهرة على القضيب.

## كيف يمكنني قياس النمو في قضيبي بطريقة دقيقة؟

إستعمل شريط القياس لهذه الغاية. أمسك القضيب في وضعية غير منتصبة وابعده 90 درجة عن جسمك. ضع شريط القياس على جانب القضيب, واضغط على طرفه باتجاه عظم العانة. وهكذا يمكنك قياس طول القضيب. إتبع نفس التعليمات لقياس النمو عند الإنتصاب.

### مهم جدا!!:

دون وزنك بدقة, وبدون ملابس, قبل البدء بالعلاج. إذا ازداد وزنك, ستلاحظ تكوين طبقة من الدهون في منطقة العانة. وستقوم هذه الطبقة الدهنية بتقصير المسافة بين عظم العانة ورأس القضيب. ويطلق الأطباء على تلك المنطقة اسم ساحة الدهون. يمكنك شراء أي من القطع الموجودة في

### العلبة على حد. لمزيد من

الإستفسارات, الرجاء الإتصال بوكلائنا. كما نحفظ بحقنا بالقيام بأي تغييرا تقنية, وفي أي وقت. والتي يتم نشرها على الإنترنت, على العنوان التالي:

<http://www.phallosan.com>

تم صنع هذا الجهاز من قبل

Phalomed Manufacturing Ltd.

UB3A Industrial Estate

SGN 3000 San Gwann, Malta

هاتف: 00356 21 470276

فاكس: 00356 21 470277

البريد الإلكتروني:

[service@phallosan.com](mailto:service@phallosan.com)

# استفد من إعلان الصداقة من Phallosan®

نحن نكافئ من أوصى باستخدام Phallosan®، فعن كل زبون جديد يشتري عن طريق توصيتك Phallosan® ستحصل كشكرلك على قسيمة شراء بقيمة 43 أورو وسنرسل لك وافي ذكري قابل للتمدد في الحجم الذي تطلبه، وذلك شريطة أن تكون أنت زبوننا ل Phallosan®، وقد اشتريته على موقعنا على الإنترنت عن طريق الكتابة أو هاتفيا، وبذلك تكون مسجلا عندنا.

سبق لي أن كنت زبوننا ل Phallosan® وقد أقتعت زبوننا جديدا بفوائده

رقم الفاتورة:

\_\_\_\_\_

الاسم:

\_\_\_\_\_

الشارع ، رقم المنزل:

\_\_\_\_\_

الرمز البريدي ، المدينة:

\_\_\_\_\_

الزبون الذي أقتعته ب Phallosan® هو:

احتاج الواقي الذكري القابل للتمدد بقيمة 38 أورو في الحجم التالي (المرجو وضع علامة في المكان المناسب)

**S** = جرس صغير مع وافي ذكري صغير

**MS** = جرس متوسط مع وافي ذكري صغير

**M** = جرس متوسط مع وافي ذكري متوسط

**LM** = جرس كبير مع وافي ذكري متوسط

**L** = جرس كبير مع وافي ذكري كبير

**XL** = جرس كبير جدا مع وافي ذكري كبير جدا

\*شروط المشاركة:

يجب أن يكون الشخص الناصح قد اشترى منتجنا قبل الشخص المنصوح، وذلك من عند Phalomed Ltd أو HGB AG. فترة العرض تبدأ في 1 نوفمبر 2009 وتنتهي في 2010.12.31 (نهاية العرض). هذا العرض لايشمل الوكلاء التجاريين. إرسال قسيمة الشراء للشخص الناصح تتم بعد نهاية الفترة القانونية لرد المنتج من طرف الشخص المنصوح. دفع قيمة قسيمة الشراء نقدا هو أمر غير ممكن

رقم الفاتورة:

\_\_\_\_\_

الاسم:

\_\_\_\_\_

يرجى الملء والإرسال إلى  
Marketing – Product Management  
Am Wallgraben 18  
DE-82541 Münsing  
Deutschland

الموعد النهائي للإرسال هو 2010.12.31

## GUARANTEES

Phallosan has several guarantees certifying you have purchased  
a medical device meeting the essential standards of quality and performance.  
(see guarantee icons below)

We sincerely hope you are satisfied with our product.

---

---

### OUR GUARANTEES

---

---



Phalomed Manufacturing Ltd., UB3A Industrial Estate  
San Gwann SGN 3000, Malta

Customer service: HGB AG, Am Wallgraben 18, 82541 Münsing, Germany  
Phone: +49 -(0)81 77-93 16 10 • Fax: +49 -(0)81 77-93 16 20